

Pulzný oxymeter prstový C101H1



Základné operácie:

Inštalácia batérií:

1. otvorte kryt batérie
2. umiestnite do otvorov 2 batérie
3. zatvorte kryt batérie

Použitie oxymetra:

1. zapnite oxymeter
2. položte prst na celú hĺbku gumovej medzery, povrch nechtu smeruje k obrazovke zariadenia a uvoľnite sponu
3. počas merania netraste prstom, odporúča sa tiež vyhýbať sa pohybu tela
4. po ustálení výsledku merania odčítajte namerané hodnoty z obrazovky
5. vypnite oxymeter - oxymeter sa vypne automaticky 5 sekúnd po odstránení prsta z prístroja.



POZOR: ak nie je prst dostatočne zasunutý do prístroja, výsledok merania môže byť nepresný.

Tlačidlo zariadenia má 3 funkcie:

1. zapnutie zariadenia – jedno stlačenie
2. keď je zariadenie zapnuté, jedným stlačením tlačidla zmeníte režim zobrazenia
3. keď je zariadenie zapnuté, stlačením a podržaním tlačidla zmeníte jas obrazovky

Výmena batérií:

Keď na obrazovke bliká symbol batérie – je potrebné batérie vymeniť.